

# FRYSS ❄️ Criolipólise

Efetiva, progressiva e duradoura



## FRYSS, equipamento de criolipólise com 6 aplicadores planos.

Proporciona redução de gordura sem dor nem risco. Além disso, sua aplicação não requer tempo de recuperação como outros tratamentos invasivos. Oferece um resultado progressivo baseado na redução de gordura das áreas tratadas de forma notável e natural.

FRYSS, executa um processo de aplicação de frio de uma maneira controlada por um determinado período de tempo, podendo ser usado em zonas mais problemáticas onde a gordura localizada está instalada. O mecanismo de eliminação do tecido gorduroso baseia-se num processo inflamatório que elimina a médio prazo os restos de adipócitos destruídos pelo frio.


**O processo de eliminação natural de gordura ocorre por alguns meses. O tratamento é eficaz: gera frio suficiente para desencadear a apoptose dos adipócitos na área selecionada, sem necessidade de sugar o tecido.**

**FRYSS**, criolipólise efetiva, progressiva e duradoura:

**Eficaz:** Estudos realizados mostraram uma redução significativa no volume de gordura nas áreas tratadas.

**Progressivo:** Os resultados para o tratamento são visíveis de imediato e a curto prazo (21 dias)

**Duradouro:** Estudos mostram que os resultados obtidos permanecem evidentes ao longo do tempo (6 meses, 2 e 5 anos).

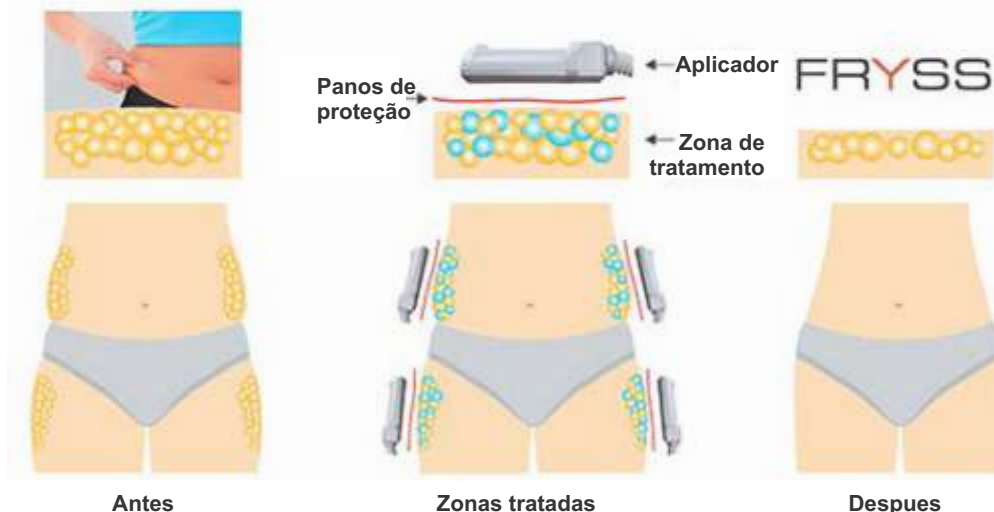



## Áreas de tratamento recomendadas:

abdômen interno de coxa      flancos região lombar      culote braços

## Tratamentos personalizados:

**Sem sucção – não invasivo – confortável**

## Sugestões de aplicação e tratamento:

Identificar as áreas a serem tratadas

Colocar a manta entre a pele do paciente e o aplicador. Assim se consegue que o frio seja transmitido diretamente às células de gordura e melhora a percepção do paciente na interface aplicador/pele.

A temperatura varia de 10°C até -10°C e conforme a área a ser tratada se usará mais ou menos tempo com maior ou menor temperatura.

A duração do tratamento depende da extensão da área a ser tratada e do número de aplicações para completar a área.

## Trate varias áreas em uma única sessão:

- 2 aplicadores para área abdominal
- 1 aplicador para cada flanko
- 2 aplicadores para área dorsal inferior



Cada aplicação tem uma duração mínima de 20 até 60 minutos por área, depende da profundidade do tecido adiposo e da tolerância do paciente.

O intervalo entre uma sessão e outra (mesma área) é de no mínimo 20 dias, para que a resposta inflamatória alcance um nível histológico efetivo.

## Aspectos para levar em consideração:


Os resultados são progressivos, o máximo nível de resposta se observa do 2° até o 4° mês, dependendo do caso, sendo essa a resposta sustentada ao longo do tempo.

No entanto, depois da primeira sessão já se observa resultados.



# CRIO LIPÓ LISE



 Detalhes Técnicos

### Fryss

Peso Total: 45,5Kg  
(Equip. + acessórios + embalagem)

### Dimensões:

Alt: 108cm  
Larg: 45cm  
Prof: 70cm

**Resultados na primeira sessão! Tratamento efetivo na redução da gordura localizada!**